

asumi

コンタクトレンズの装着薬

販売名:ラクウェルb

指定医薬部外品

ご使用前にはこの添付文書を必ずお読みください。表現や内容でわからないところがあれば必ず医師、薬剤師又は登録販売者に相談し、よく確認してからお使いください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

特徴



①水からこだわりました
水のふるさと奥美濃・
郡上八幡でつくっています。



②レンズ、つけやすく
ふわっとフィットし、
つけごち快適。



③コンタクトレンズメーカーが開発
レンズとの相性にこだわって
開発した装着薬です。

すべてのタイプのコンタクトレンズに
お使いいただけます。
※「シード ワンデービューアうるおいプラス」
にはお使いいただけません。

使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人 (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 次の症状がある人 はげしい目の痛み

2. ご使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

効能・効果

ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズの装着を容易にする。

成分・分量


有効成分	配合量
ポリビニルアルコール(部分けん化物)	1.0%
塩化ナトリウム	0.4%

添加物:エデト酸ナトリウム水和物、リン酸二水素カリウム、無水リン酸一水素ナトリウム、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム、塩酸ポリヘキサニド、pH調整剤

用法・用量

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法・用量をお守りください。
- (2) 小さなお子さまがご使用になる場合には、保護者の方の指導監督をお願いします。

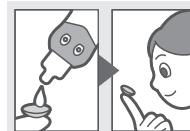

本剤の1~3滴で、
コンタクトレンズ
の両面をぬらして
装着すること。

- (3) 容器の先がコンタクトレンズや指先などに触れると、雑菌などにより、本剤が汚染、混濁又は変色するおそれがあります。混濁・変色した場合は、本剤の使用を中止してください。

- (4) コンタクトレンズを装着したまま使わないでください。

※装着後、目からあふれた場合には、清潔なガーゼなどで軽くふきとってください。成分の結晶が目の方に付着することがあります。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) ご使用後はキャップをしっかりしめて、直射日光のあたらない、涼しいところで凍結をさせて保管してください。
- (2) 小さなお子さまの手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 保管の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼなどで軽くふきとってお使いください。
- (6) 使用期限を過ぎたものは、使わないでください。また、使用期限内であっても、開封後はすみやかにお使いください。
- (7) 容器に他のものを入れて使わないでください。
- (8) 本剤は目薬ではありません。点眼しないでください。

※容器のラベルフィルムはキャップまでおおわれています。ご使用前にキャップ部分のフィルムがはがれていた場合は、使わないでください。

【コンタクトレンズご使用の際の注意】●コンタクトレンズを取り扱う前には、毎回必ず手を石けんよく洗い、水道水(流水)でよくすすいで清潔にしてください。●コンタクトレンズを清潔に、また清浄に保つために洗浄、消毒、保存などのレンズケアについては十分心がけてください。●コンタクトレンズをご使用中の方は、眼科医による定期健診を必ずお受けください。

お問い合わせは **0120-967-371**

受付時間/9:30~17:30(土・日・祝日・弊社休業日を除きます)

ウェブサイト **www.meniconnect.co.jp**



【製造販売元】
株式会社メニコンネクト
〒452-0805
名古屋市西区
市場木町390番地