

ソフトコンタクトレンズ用  
洗浄・すすぎ・消毒・保存液

asumi ソフトコンタクトのケア

## 医薬部外品

ご使用前にはこの箱に書かれている説明を必ずお読みください。表現や内容でわからないところがあれば必ず眼科医または販売店に相談し、よく確認してからお使いください。また、必要ときに読めるように大切に保管してください。

●本剤はソフトコンタクトレンズの消毒を目的とするものですが、レンズの洗浄(こすり洗い)やすすぎなど、この箱に書かれている使用方法や注意事項に従って正しく使用しないと、洗浄・消毒が不完全となり、重い眼障害の原因となったり、それが進行すると視力を失う危険性も生じます。この箱に書かれている事項は必ずお守りください。●少しでも異常を感じたら直ちに眼科医の診察を受けてください。また、治療せずそれを放置すると重い眼障害の原因となったり、それが進行すると視力を失う危険性も生じます。●ソフトコンタクトレンズの取り扱いについてはレンズの添付文書をよく読み、その使用方法などを守ってください。

ソフトコンタクトレンズは水分を含んだ素材でできているため、装着していると涙液に含まれるタンパク質、脂質、カルシウムなどがレンズに付着します。これらの汚れをそのままにしておくと、装着感が悪くなったり、レンズの品質を低下させます。また、細菌やカビなどが繁殖して、眼の感染症を引き起こすことがあります。このようなことを防ぐため、ソフトコンタクトレンズは装着後の洗浄、すすぎ、消毒が不可欠です。

## 使用方法

### レンズのケア



#### 1. 洗浄

レンズを目からはずし手のひらにのせ、本剤を数滴つけます。レンズの両面をそれぞれ20～30回、指でいねいにこすりながら洗います。



#### 2. すすぎ

レンズに本剤をかけながら、指先でこするようにしてよくすすぎます。




#### 3. 消毒・保存

本剤を満したレンズケースにレンズを完全に浸し、ケースのフタをしっかりとめます。そのまま4時間以上放置して消毒します。



#### 4. 装用前のすすぎ

消毒が終わったら、レンズの両面を本剤でよくすすいでから装用します。

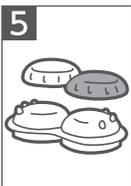

#### 5. ケースの洗浄・乾燥

レンズ装用後はケースに残った液をすてます。水道水でよく洗った後、自然乾燥させてください。レンズケースは定期的に新しいものと交換してください。(1ヶ月を目安に)

## 使用上の注意

### <守らなければならないこと>

●この箱に書かれている使用方法を厳守してください。指定されたこすり洗い及びすすぎを怠るなど、使用方法を誤ると消毒が不完全となり、感染症や角膜潰瘍などの重い眼障害の原因となることもあります。また、それを治療せずに放置すると視力を失う危険性も生じます。●レンズを取り扱う際には、毎回必ず手を石けんでよく洗い、水道水(流水)でよくすすいでください。●レンズの消毒及び保存は、本剤にてこすり洗い及びすすぎを行った後、本剤を満したレンズケースにレンズを完全に浸し、ケースのフタをしっかりとめてください。●定められた消毒時間(4時間以上)を必ずお守りください。●使用後はレンズケースの液をすて、水道水でよく洗った後、自然乾燥させてください。●小さなお子さまがご使用になる場合には、保護者の方の指導監督をお願いします。●目に異常を感じなくても、眼科医による定期健診を受けるようにしてください。

### <してはいけないこと>

●本剤はソフトコンタクトレンズの洗浄・すすぎ・消毒・保存にのみ使用し、点眼・服用しないでください。●容器の先がレンズや指先などに触れると、雑菌などにより、本剤が汚染、混濁または変色するおそれがあります。混濁・変色した場合は、本剤の使用を中止してください。●煮沸消毒に使わないでください。また、他のソフトコンタクトレンズ用消毒剤と混ぜて使わないでください。●レンズケース内に残った液は必ずすて、毎回新しい液をお使いください。また、一度出した液は容器に戻さないでください。●使用期限を過ぎたものは、使わないでください。

### <相談すること>

●次の人は使用前に眼科医にご相談ください。  
1. 今までに目のアレルギー症状(例えば、目の充血、かゆみ、はれ、発疹、発赤など)を起こしたことがある人。  
2. 眼科医の治療を受けている人。  
●使用中にじんましん、息苦しさなどの異常があらわれた場合には直ちに使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。特にアレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は、十分注意してお使いください。  
●使用中又は使用後は、次のことにご注意ください。本剤を使用したソフトコンタクトレンズを装用中、または装用後に、炎症、かわき目、疼痛、かゆみ、流涙、目のかすみ、目の充血等の異常を感じた場合には、直ちにレンズを外し、眼科医に相談してください。そのまま装用し続けると、感染症や角膜潰瘍などの重い眼障害の原因となることもあります。

## 用法・用量

1. ソフトコンタクトレンズに、本剤を数滴つけて、レンズの両面をそれぞれ、20～30回指で軽くこすりながら洗います。
2. 洗ったレンズの両面を本剤で十分にすすぎます。
3. レンズケースに本剤を満たし、レンズを完全に浸し、ケースの蓋をしっかりと締めます。そのまま4時間以上放置します。

販売名: ケアスター

効能・効果: ソフトコンタクトレンズ(グループI～グループIV)の消毒

成分: 1mL中、塩酸ポリヘキサニド0.001mg含有  
界面活性剤、等張化剤、安定剤、粘糊剤、pH調整剤  
表示指定成分: エデト酸ナトリウム

本剤には、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールが含まれています。

## 保管及び取り扱い上の注意

●小さなお子さまの手の届かない所に保管してください。  
●使用後はキャップをしっかりとめて、直射日光を避け、涼しいところで凍結をさせて保管してください。●誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。  
●専用レンズケースは熱に弱いため煮沸消毒には使わないでください。●レンズケースは長期間使用していると汚れなどの蓄積により細菌が繁殖することがありますので、専用レンズケースは定期的に新しいものと交換してください。(1ヶ月を目安に)●開封後は1ヶ月を目安にお使いください。

●お問い合わせはコチラまで。

0120-967-371

受付時間/9:30～17:30  
(土・日・祝日・弊社休業日  
を除きます)

ウェブサイト

www.meniconnect.co.jp

【製造販売元】

株式会社メンコネット

〒452-0805

名古屋市中西区市場木町390番地

